

Rekondisjoneringsanvisning, serviceinstruksjon for Volaris rullatorer

Hjul

Kontroller at/om	Tiltak	Kommentar	ok
Hjulene ikke er skadet, og at kulelageret ikke lager ulyder	Hjulet må rulle lett, ellers bytt hjul, (lageret dårlig)	Ved bytte av hjul, bytt også låsemutter	
Slitebane ikke er skadet	Bytt hjul	Ny låsemutter	
Kontroller at skruene ikke er løse	Stram skruene (bruk lim, Loctite 270)		
Hvis låsemutter mangler	Ny låsemutter (bruk lim, Loctite 270)		
Forgaffelen er skikkelig på plass i stativet	Stram forgaffelen skikkelig med Nylock-mutter. (alt. bruk lim, Loctite 270)		
Forgaffelen ikke er skadet	Bytt ut forgaffelen.		

Bremser

Kontroller at/om	Tiltak	Kommentar	ok
At bremseklossen ikke er slitt	Bytt ut bremsekloss		
Avstand mellom bremsekloss og hjul er 1 mm	Juster		
Kontroller at bremsen tar skikkelig	Juster, smør vaieren.		
Bremsehåndtak ikke er skadet	Bytt bremsehåndtak		
Kontroller at bremsehåndtaket er skikkelig på plass i aluminiumsprofilen	Stram skruene, bytt bremsehåndtak om nødvendig		
Høydejusteringen av håndtak går lett	Bytt profil		
Ingen skader på profilen	Bytt profil		

Foldemekanismen

Kontroller at/om	Tiltak	Kommentar	ok
Foldingen går lett	Smør med litt fett ved kryss		
Foldesperren går lett og låser.	Bytt foldesperre		
Skader på krysset	Bytt krysset		

Håndtak

Kontroller at/om	Tiltak	Kommentar	ok
Håndtakene ikke er skadet	Bytt ut håndtaksgrepene		
Armleneplatene er ikke skadde	Bytt ut armleneplaten		
Kontroller at skruene ikke er løse	Stram skruene (bruk lim, Loctite 270)		

Justeringer

Kontroller at/om	Tiltak	Kommentar	ok
Kontroller at hevingen av håndtak går skikkelig i lås	Bytt låsemekanisme		
Låseknot for høydejustering	Stram låseknoten for høydejustering samt låseprofilen og skiven.		
At setet kan justeres og går i lås	Bytt sete		

Ramme

Kontroller at/om	Tiltak	Kommentar	ok
Ingen mekaniske skader på stativet	Kasser rullatoren		

Ingen skader på lakken

Utbedre skader med utbedringslakk

Sete

Kontroller at/om

Tiltak

Kommentar

ok

Setet ikke er skadet

Bytt sete

Ryggbånd

Kontroller at/om

Tiltak

Kommentar

ok

Ryggbånd/feste ikke er skadet
og at skruene er skikkelig strammet

Bytt ryggbånd og stram skruer

Rekondisjonering

Kontroller at/om	Tiltak	Kommentar	ok
------------------	--------	-----------	----

Ved rekondisjonering i vaskeanlegg skal ikke rullatorens bremse være på. Rullatoren skal kjøles ned til romtemperatur før den brukes og justeres.

Vaskekabinett 60 grader i 45 min.

Vevd manuell vask: Tørk av smuss med en våt klut og et mildt rengjøringsmiddel. Pass nøye på at det ikke samler seg smuss mellom hjulene og bremsebakkene, det kan påvirke bremseeffekten! Det går fint å spyle av med en høytrykksvasker eller en hageslange.

Tørk tørt etterpå.

Rullatormodell: _____

Serienummer: _____

Service utført av

Navn: _____

Dato: _____

Signatur: _____